

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

**Getinge 363**  
乾燥 キャビネット



Always with you

# 洗浄した器材を速やかに、 そして、安全に乾燥させる

ゲティンゲ 363 乾燥キャビネットおよびカセットシステムは、洗浄後の器材を効率よく短時間で乾燥させます。また、ゲティンゲのウオッシャー・ディスインフェクターで洗浄されたホース類を専用アクセサリのカセットごと 363 乾燥キャビネットに差し込んで乾燥することができます。ウオッシャー・ディスインフェクターが不足している中材においても、洗浄・消毒後の器材や器具の乾燥を効率よく行うことができます。

乾燥時間は、0-90 分まで 5 分毎に設定ができ、ディスプレイには残り時間が表示されます。また、設定された時間が終了しても過熱防止のためファンは二分間作動します。


乾燥時の庫内温度は、70℃(プラスチック・ゴム製品用など)と 90℃(オートクレーブ対応の鋼製小物類など)に設定することができます。

## 静電気フィルター、ファン、ヒーター

作動領域から吸収された空気は静電気フィルターを通り、80cbm/h の気流では 0.3 - 10 $\mu$ m のサイズの微粒子がフィルターされます。これは、94 - 99%のフィルター効果を示すものです。フィルターは手で簡単に取り外して、洗浄することができます。ファンおよびヒーター・モジュールは 125W (=250cbm) のファンおよび 3.365kW の電気ヒーターで構成されています。循環している乾燥した空気のうち、3分の1が排気され、残りは循環し続けます。

## Getinge の洗浄器と一緒に使うと便利な機能があります


Getinge のウオッシャー・ディスインフェクターの洗浄アクセサリには、麻酔器具のホースやバッグを洗うためのカセットホルダーがあります。

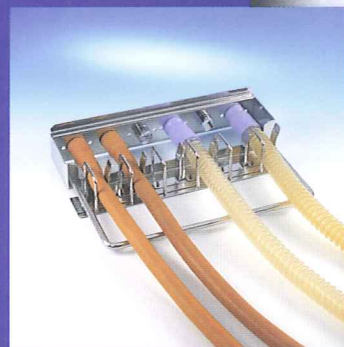

## 2 種類のモデル

ゲティンゲの 363 乾燥キャビネットシリーズには 2 種類のモデルが用意されています：

- 363 E111 片扉(シングル・ドア)モデル、ガラス ドア
- 363 D211 両扉(バス・スルー)モデル、ガラス ドア

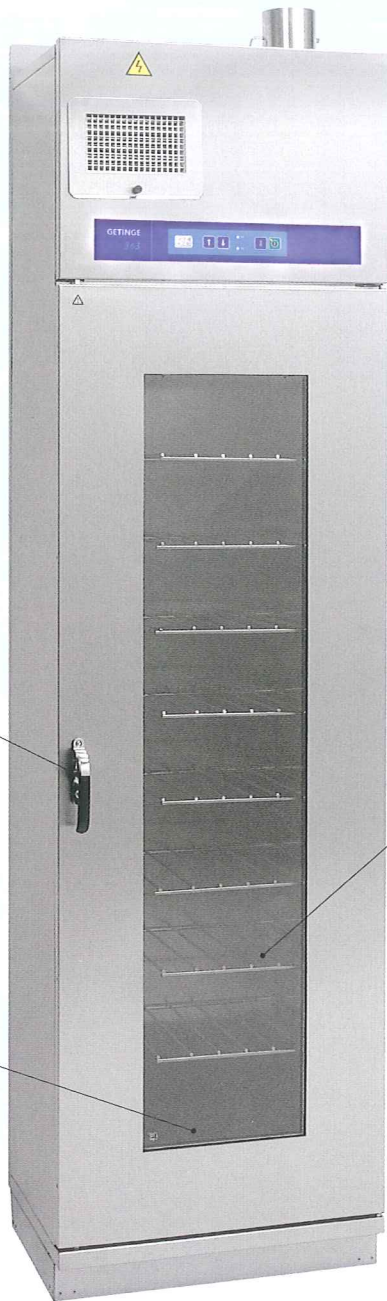

**シングル・ドアモデルまたは  
バス・スルーモデル**

363 乾燥キャビネットは、  
片扉 (シングル・ドア) モデル：  
363E と両扉 (バス・スルー)  
モデル：363D の 2 種類を  
ご用意しています。

**水の硬質成分の付着を  
最小限に**

ホースを吊るして素早く乾燥  
することにより、水の硬質成  
分が付着することを防ぎま  
す。


**高速乾燥**

ホースは最大 36 本を約 40 分、  
器材トレイ 18 枚を約 20 分で  
乾燥させます。

**標準装備**

363 乾燥キャビネットには、  
取り外し可能な棚が 9 枚装備  
されています。

別売りの麻酔器具のホースやバッグを  
洗うためのカセットホルダーが最大 6 台  
取付けできます。

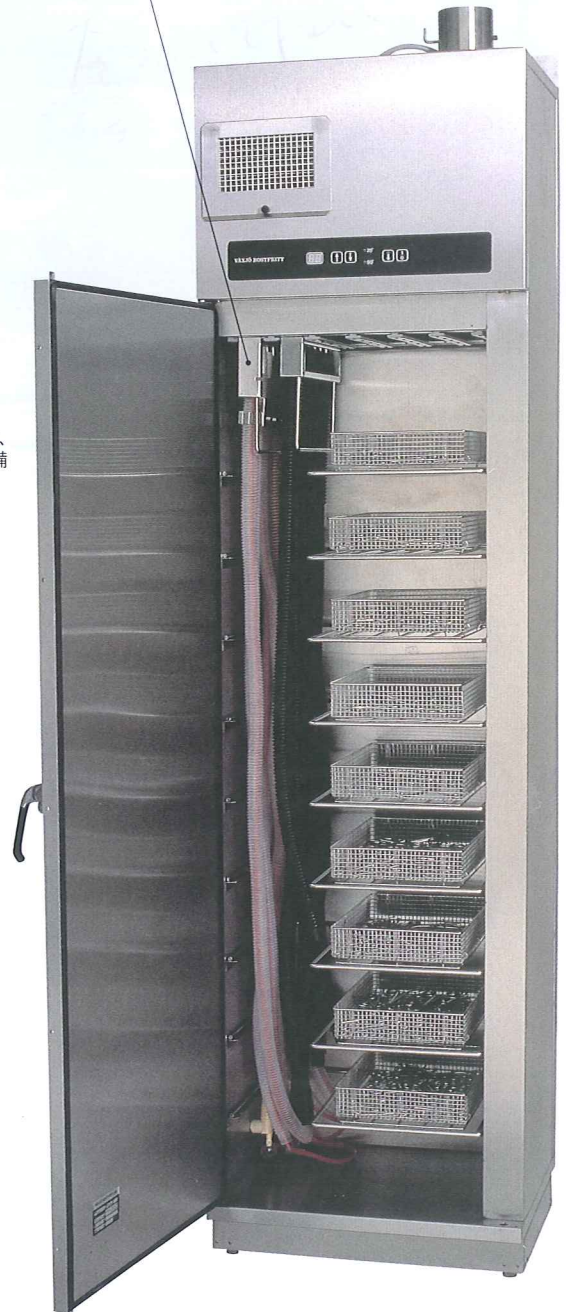


CE 認可済み CE

**構造および素材**

363 乾燥キャビネットはステンレススチールの二重の壁で構成されており、その間には防音材の層が組み込まれています。これにより、騒音レベルが 50db (A) まで減少します。ケース、ドア、棚は良質のステンレススチール (素材番号: 1.4301, AISI304) から製造されています。

■ 自立型 シングルドア

■ 埋め込み型 ダブルドア/シングルドア

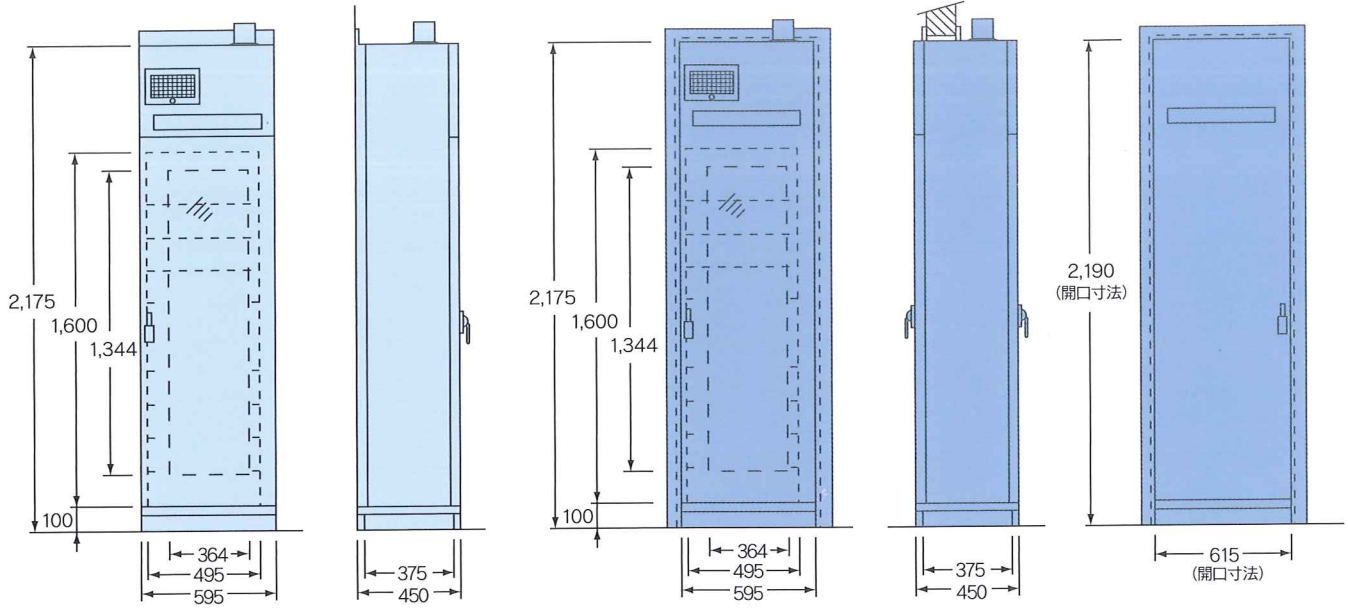

- 電 源 ----- 200V, 3相, 50/60Hz, 13A
- 重 量 ----- 約100kg
- 材 質 ----- ステンレススチール SUS304

- 排気 63φ 風量50 m³/h
- ガラスドア 標準装備(W:364×H:1,344)
- ※仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

**ゲティンゲ・ジャパン株式会社**

ヘルスケア事業部

本社: 〒108-0074 東京都港区高輪3-11-3 東信高輪ビル9階

Phone: (03)5791-7560

Fax: (03)5791-7565

enquiries-inco@getinge.com    www.getinge.co.jp

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGEグループは、ヘルスケアとライフサイエンスにおいて品質向上とコスト効率で貢献する医療機器とシステムを世界において、ご提供しております。私どもは、3つのブランド名 (ArjoHuntleigh, GETINGE, MAQUET) のもと、様々なサービスをご提供しております: **ArjoHuntleigh**—患者取扱い用具、衛生関連機器、DVT防止、医療用ベッド、治療用具および診断関連製品。GETINGE—ヘルスケア分野における感染管理のためのソリューションとライフサイエンス分野における汚染防止策。MAQUET—手術および集中治療の現場への手術台、患者移送システム、人工心臓など、治療に関連する機器とソリューション。